

!!! Opgelet: **HEET WATER** - Lees de implementatie zorgvuldig voordat u doorgaat !!!

Vorbereiding van uw Stabi-pads™ interfacepad

Uw Stabi-pad™ interfacepad moet worden verwarmd tot een temperatuur van ongeveer 70°C, zodat het zacht en buigzaam wordt, voordat u het op uw gezicht aanbrengt. Zo neemt het de vorm van uw gelaat aan.


Volg onderstaande instructies:

1. Giet kokend water in een diepe schaal of een bord van voldoende grootte.
2. Leg een Stabi-pad™ in het water, met de witte kant naar boven. Het pad zal op het water drijven. Na ongeveer 2 minuten wordt het soepel en helemaal week.
3. Haal de Stabi-pad™ met een vork uit het water en plaats het op een droge handdoek; vouw de handdoek over de Stabi-pad™ om het overtollige water te absorberen.



4. *Vanaf nu wordt aanbevolen om voor een spiegel te gaan.* Enkele seconden nadat het overtollige water is verwijderd, is de temperatuur van uw Stabi-pad™ teruggevallen tot ca. 40°C. Centreer het pad op uw gezicht, met de witte kant op uw huid, de flappen aan beide zijden van uw neus.
5. Plaats uw neusmasker bovenop uw Stabi-pad™ en hou het vast met een druk die vergelijkbaar is met de normale druk van uw masker wanneer het vastgeriemd is. In minder dan 2 min. heeft uw Stabi-pad™ de vorm van uw gezicht aangenomen en wordt het weer halfstijf.

Uw Stabi-pad™ is nu klaar voor dagelijks gebruik gedurende 2 tot 3 weken.

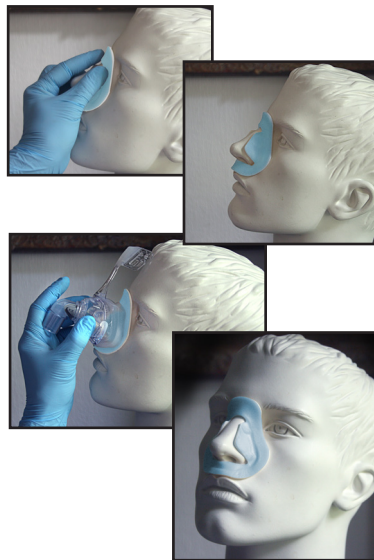

De hele operatie kan opnieuw worden gestart vanuit fase 1 als dit nodig is, bv. als de pad is uitgedleden en onjuist is gepositioneerd of verkeerd is gevormd.

Wanneer u uw masker voor de nacht opzet, pas dan op dat u niet meer spanning op de riemen zet dan nodig is. Uw Stabi-pad™ laat u immers toe de riemen minder sterk aan te spannen.



Onderhoud en reiniging: goede gewoonten

Uw Stabi-pad™ interfacepad kan eenvoudig worden schoongemaakt.

Maak er een gewoonte van om uw Stabi-pad™ (m.n. de delen die in contact komen met uw huid) af te vegen met een vochtig handdoek, wat mild reinigingsmiddel en lauwwater. Hiermee worden eventuele oliën, dode huidcellen en zweet op het masker verwijderd, die de kwaliteit van de afdichting kunnen beïnvloeden. Spoel zachtjes met een schone handdoek en laat aan de lucht drogen.

U kunt ook vochtige doekjes gebruiken die speciaal zijn ontworpen voor het reinigen van CPAP-maskers. Ze zijn verkrijgbaar bij veel slaapcentra. Het neemt het achtergebleven vuil of vet weg dat de nacht ervoor is opgebouwd (zoals make-up of zweet dat op uw gezicht lag).

Uw Stabi-pad™ vervangt u best na 2 à 3 weken gebruik.

We adviseren u om uw gezicht te wassen voordat u gaat slapen, bij voorkeur met zeep met neutrale pH, om overtollige huidsmeer te verwijderen. Lotions en nachcrèmes mag u gebruiken, ook waar uw Stabi-pad™ in contact komt met uw gelaat: deze producten hebben geen invloed op de materialen waarvan uw Stabi-pad™ is gemaakt.

Gefabriceerd door:
T-Tape Company BV
Bosweg 10-12
4645 RB Putte
Nederland
Tel: +31 164 60 29 52
turbocast@planet.nl
www.turbocast.eu



www.CPAPhelper.ORG
Tel.: +32 475 424521
stabi-padinfo@telenet.be



Je masker past altijd en jij bent beschermd. Wat zijn Stabi-pads™ en hoe deze te gebruiken?



Een Stabi-pad™ werkt als een interface tussen uw neuskapmasker en uw gezicht, waardoor uw masker zich gedraagt als op maat gemaakt. Na een korte verwarming komt het pad exact overeen met de vorm van uw gezicht. Ook de belasting op uw huid gaat aanzienlijk verminderen. De Stabi-pad™ is nl. semi-rigide en wat breder dan het masker. Zo wordt de druk van het masker op een veel grotere oppervlakte van uw gelaat verdeeld, wat uw comfort ten goede komt.

Eenmaal uw Stabi-pad™ gevormd is, gaat het 2 tot 3 weken mee.

Typische neusmasker-problemen die met Stabi-pads™ worden opgelost zijn:

- Luchtlekken, irriterend voor de ogen
- Druksporen, huidirritatie, drukwonden
- Neusbrug ongemak
- Moeilijk passend masker
- Nachtelijke verplaatsing van het masker